

檢驗名稱	Culture aerobic(other)	中文名稱	生殖道檢體培養
檢驗代碼	culeot	健保編號 (點數)	13007C、13009B (350)
檢體種類	Vagina、Cervix discharge、Female urethral discharge、Penis、Scrotum、Male-urethral discharge、Prostatic fluid	檢驗方法	culture
採集容器	黑頭培養拭子	操作時間	每週一~週六
採檢體量	液體至少 1mL	報告時間	Negative: 第三天 Positive: 三~五天發最終報告(含藥物敏感性試驗結果)
送檢時間	24 小時收檢，如無法立即送檢須將檢體 4°C 冷藏，並於 24 小時內送檢	操作單位	檢驗科細菌室
採檢注意	無		
檢體保存	操作後剩餘檢體 2-8°C 保留 3 天		
生物參考區間	No growth within 48 hours	可報告範圍	No growth within 48 hours、陽性依鑑定與藥敏結果
臨床意義	<p>(1).Vagina，Cervix discharge，Female urethral discharge 此部位所採之檢體均為非無菌區，正常情況下即有少量細菌存在。</p> <p>(2).生殖道常分離出之致病菌：Neisseria gonorrhoeae，Strepto-group A or B，Enterobacteriaceae，L. monocytogens，Neisseria meningitidis，Candida albicans-(if showing heavy or pure)，如有上述致病菌存在，均會造成生殖道感染。</p> <p>(3).Penis，Scrotum，Male-urethral discharge，Prostatic fluid：因 male 與 female 之生理結構差異，所以採取檢體時，較不易受泌尿道之表皮常在菌污染，故當細菌培養出時，均可能為致病菌。</p> <p>(4).Endocervix，Endometrium：此類檢體系較深層取得，是為無菌區正常情況下完全無菌，所以只要有細菌生長，即表示生殖道感染，故所以分離出來的細菌，均須加以鑑定及抗生素敏感性試驗。</p>		
備註			

修訂日期:2024.11.18